



ALL-IN-ONE
GÅLIFT

Den ideelle løsning til gangtræning

ALL-IN-ONE GÅLIFT

GåLiften bruges til genoptræning af korrekt gangfunktion. Man opnår vægtaflastning, balance og holdning.

All-In-One GåLift er unik. Basisenheden er den samme som fra All-In-One Personløfter, derfor kan GåLiften ændres til person- eller stålift. På basisenheden monterer man den specielle "gaffelarm", hvis udformning giver frit udsyn for patienten, samt de højdeindstillelige håndstøtter, som giver patienten støtte og øget sikkerhed. Nu har man den nye All-In-One GåLift. Brug vores specielle GåLift sejl til at udføre løft og gåtræning.



All-In-One GåLift leveres i to versioner:

Maksimum belastning op til 150kg.

Maksimumbelastning op til 200kg.

Funktionen er den samme, men 150kg versionens understel har en længde på 117cm, mens

200kg versionens understel har en længde på 122cm og to integrerede motorer til benspredning.



Placer sejlet omkring patienten, som sidder i stolen/kørestolen. Luk mavebæltet omkring patienten og stram til, det skal stadig være behageligt for patienten. Benstropperne føres mellem lårene, og gennem benstroppernes sorte løkker trækkes løftestroppe, som er placeret foran skuldrene. Vær opmærksom på, at de fire grå løftestroppe er i samme højde, før de sættes på gaffelarmen. Nu kan løftet og træningen begynde.



GåLiftens konstruktion giver bl.a. følgende fordele for patient og terapeut:

- Patienten kan løftes fra siddende stilling
- Højden kan trinløst tilpasses patienten
- Sikker og behagelig påføring af sejl
- Stabilitet gennem 4-punkts-ophæng
- Vægtaflastning for patienten
- GåLiften er meget manøvreduktig
- Gangtræningen er sikret mod fald
- GåLiften kan passere gennem døre
- Patientvægt op til 200kg
- Ofte kan én terapeut udføre træningen
- Patienten glider ikke under løft
- Træningen giver mening for patienten

Det specielle GåLift sejl giver optimal støtte under patienten, på en komfortabel måde. Herved undgår man, at patienten kan falde.



Bemærk: GåLiften er udstyret med to retningsstyringer. Herved sikrer man, at patienten nemt og sikkert kan gå i en lige linje.

Basisenhed

Basisenhed med "Gaffelarm" og Håndstøtter



Tilføj fleksibelt løfteåg



All-In-One GåLift kan konverteres til en almindelig Personløfter eller Stålift uden brug af værktøj. Du behøver blot at fjerne "Gaffelarmen" og Håndstøtterne, hvorefter du påmonterer enten løfteåg eller "Ståløfte kit".



Ståløfter

Tilføj ståløfter arm og fodstøtte



Personløfter

BESTILLINGSINFORMATION

VARENR. BESKRIVELSE

25-20035	All-In-One GåLift 150kg
25-20526	All-In-One GåLift 200kg
25-20135	All-In-One GåLift Kit (Kan bruges på All-In-One Personløfter)

25-45021	GåLift Sejl S
25-45022	GåLift Sejl M
25-45023	GåLift Sejl L
25-45024	GåLift Sejl XL

Højde på håndstøtter	66-97cm
Afstand mellem håndstøtter	68cm
Løftehøjde	105-200cm
Maks. belastning	150kg eller 200kg
Understel, længde	117cm/122cm
Understel, højde	12cm
Bredde ved åbne ben	109cm/133cm
Totalvægt	51kg/54kg
Antal løft pr. opladning	60/30

ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

Ropox A/S

Ringstedgade 221

4700 Næstved

Telefon 5575 0500

Telefax 5575 0550

info@ropox.dk

www.ropox.dk